

Orbisana Videolupe

Art.-Nr. 147713348

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



1. Produktidentifikation

- Diese 3,5-Zoll-Videolupe hilft Personen mit Sehschwäche, Texte, Schriften und Bilder deutlich und hell lesen zu können: Jederzeit und überall.
- Die Videolupe kann auch an den Fernseher angeschlossen werden, um bequemer lesen zu können.


Technische Daten

- Display: 3,5-Zoll-TFT-LCD-Anzeige
- Variable Vergrößerung: 2-fach bis 32-fach
- Drei Farbmodi: Vollfarbe, weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund, schwarze Schrift auf weißem Hintergrund
- Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Akku
- Akku-Betriebszeit mit einer Ladung: Bis zu 3 Stunden
- Unterstützt Fotoaufnahmen (Speicherkarte nicht in der Lieferung enthalten)
- TV-OUT Modi: PAL/NTSC
- Ladegerät: Mini-USB-Schnittstelle
- Stromversorgung: Standard-Netzteil, DC 5 V / 1 A
- Maße: 109 x 75 x 13 mm

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Die Videolupe ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie die Videolupe nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen
- Reinigungs- und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden

Tasten und Bedienelemente

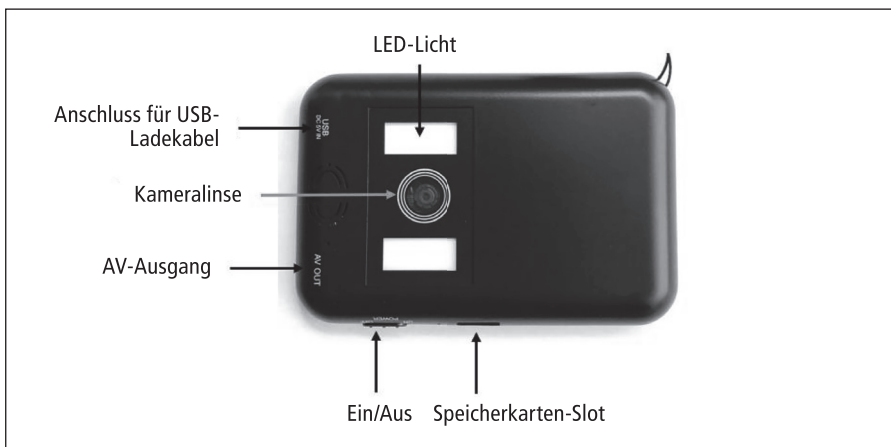


3. Sicherheitshinweise

Um Ihre Lupe in gutem Zustand zu erhalten, beachten Sie die folgenden Hinweise:





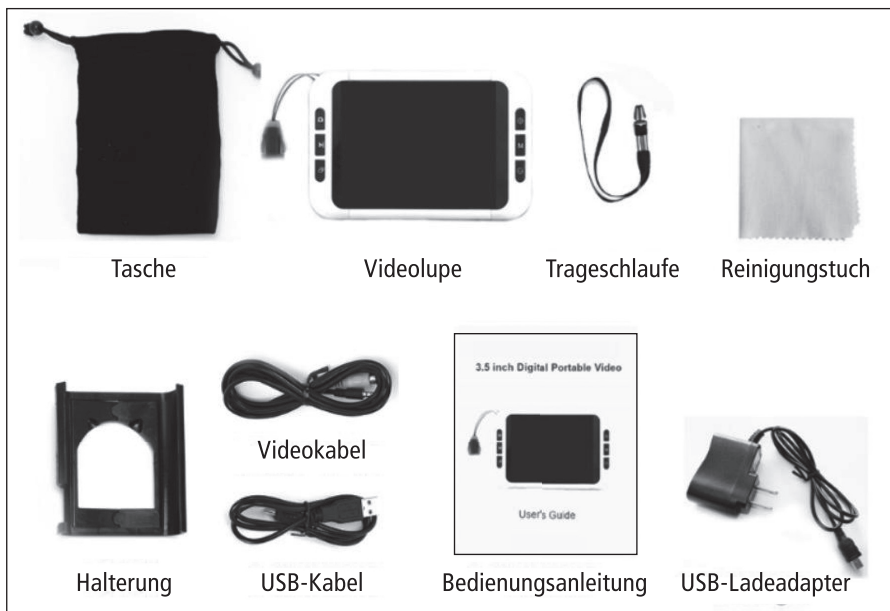





- Lesen Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Versuchen Sie nicht, die Lupe zu reparieren oder ihr Gehäuse zu öffnen. Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Halten Sie die Lupe von Feuchträumen, Regen und anderen Quellen von Flüssigkeiten fern. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie die Lupe immer an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen 10 °C und 40 °C liegt.
- Lagern Sie die Lupe immer an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen 20 °C und 65 °C liegt.
- Versuchen Sie nicht, einen Stecker mit Gewalt in den Strom-/Videoanschluss des Geräts zu stecken. Sämtliche Stecker sollten leicht in den Anschluss passen.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur den mit der Lupe gelieferten Netzadapter. Andere Netzteile können das Gerät beschädigen.

4. Lieferumfang



5. Montage / Inbetriebnahme


Bedienung

- Setzen Sie die Lupe in die Halterung ein.
- Schalten Sie die Ein-/Ausschalttaste auf „EIN“.
- Das LED-Licht leuchtet nach 1,5 Sekunden auf, das LCD-Display zeigt das Bild an.
- Legen Sie die Lupe auf ein Buch oder eine Zeitung usw.
- Drücken Sie die Taste Vergrößern  oder Verkleinern , um die für Sie passende Vergrößerung einzustellen (2x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x, 24x, 32x).
- Um den Farbmodus zu ändern, drücken Sie die Taste Farbmodus  (drei Farbmodi stehen zur Auswahl).
- Drücken Sie die Standbild-Taste , um das Bild einzufrieren. Drücken Sie  noch einmal zur Freigabe des Bildes.
- Nach dem Einlegen der Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten), drücken Sie die Aufnahmetaste , um Fotos aufzunehmen.
- Wiedergabe: Drücken Sie die Wiedergabetaste , um Fotos anzusehen, und drücken Sie  und , um vor- und zurückzublättern. Wenn Sie das aktuell angewählte Foto löschen möchten, drücken Sie einfach die Taste .

Weitere Funktionen

Anschluss an einen Fernseher oder Monitor

Videoausgang: Wenn Sie eine stärkere Vergrößerung als den 3,5-Zoll-Bildschirm der Lupe benötigen, können Sie die Lupe über das mitgelieferte Videokabel an ein Fernsehgerät anschließen. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Lupe an einen Fernseher anzuschließen.

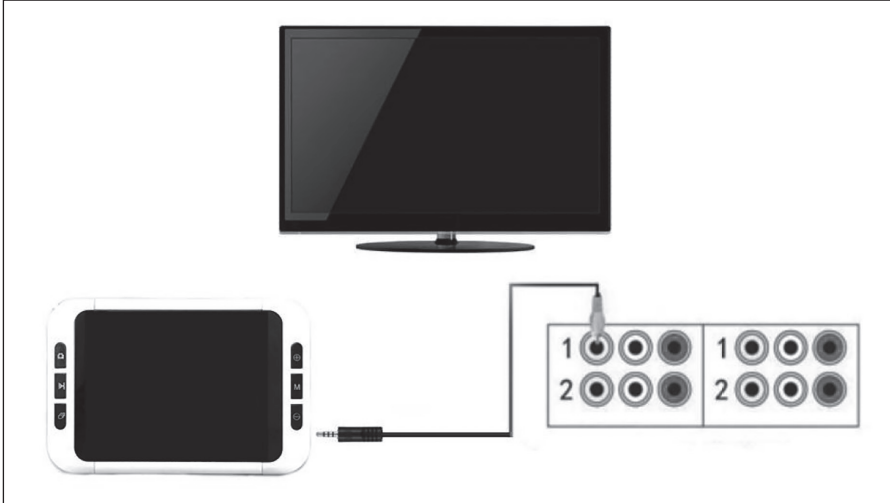

Stromsparfunktion

Das Gerät verfügt über eine intelligente Energiesparfunktion. Nach 15 Minuten, wenn das Bild sich nicht verändert und keine Tasten bedient werden, schaltet sich die Videolupe automatisch aus, um Strom zu sparen.

Hinweis auf niedrigen Stromverbrauch

Das Gerät verfügt über eine Erinnerungsfunktion bei niedrigem Stromverbrauch. Wenn der Stromverbrauch niedrig ist, erscheint ein Symbol für niedrigen Stromverbrauch auf dem LCD-Bildschirm und die Stromanzeige erlischt.

Wenn die Aufforderung zum Energiesparen erscheint, laden Sie den Akku bitte umgehend auf.

6. Reinigung und Pflege

Um Ihre Lupe in gutem Zustand zu erhalten, beachten Sie die folgenden Hinweise zur Reinigung und Pflege:

- Schützen Sie die Lupe vor Feuchtigkeit und Nässe. Dieses Gerät darf nur trocken gereinigt werden.
- Zum Säubern wischen Sie die Lupe lediglich mit einem trockenen Tuch ab (am besten mit dem mitgelieferten Reinigungstuch).

7. Fehlersuche

Problem	Lösung
Das Display der Videolupe schaltet sich aus.	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob sich die Ein/Aus-Taste in der Position „Ein“ befindet.• Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.• Prüfen Sie, ob der Akku eventuell leer ist. In diesem Fall müssen Sie den Akku umgehend wiederaufladen.• Achten Sie darauf, dass der Fokuspunkt der Lupe direkt auf das zu lesende Material gerichtet ist.
Die Videolupe lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob der Akku eventuell leer ist. In diesem Fall müssen Sie den Akku umgehend wiederaufladen.
Die Anzeige im Display der Videolupe ist zu dunkel oder zu hell.	<ul style="list-style-type: none">• Achten Sie darauf, dass der Fokuspunkt der Lupe direkt auf das zu lesende Material gerichtet ist.• Achten Sie darauf, dass die richtige Linse (Entfernungslinse) gewählt wurde (Vergrößerung/Verkleinerung).
Die Darstellung im Display der Videolupe ist verschwommen oder schmutzig.	<ul style="list-style-type: none">• Wischen Sie das Display und die Linsenabdeckung mit einem trockenen Tuch ab.• Achten Sie darauf, dass die richtige Linse (Entfernungslinse) gewählt wurde (Vergrößerung/Verkleinerung).• Prüfen Sie, ob die Transport-Schutzfolien von Display und Linse entfernt wurden.
Der Text im Display ist zu klein.	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die Vergrößerungstaste (Zoom +), um den Text zu vergrößern.
Die Videolupe wurde am Fernseher angeschlossen, aber im Fernseher ist kein Bild zu sehen.	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob der Fernseher eingeschaltet ist. Wenn Sie die Videolupe am AV-Eingang des Fernsehers angeschlossen haben, stellen Sie die Eingangsquelle am Fernseher bitte auf „AV-Eingang“ ein.• Wenn Sie die Videolupe am HDMI-Eingang des Fernsehers angeschlossen haben, stellen Sie die Eingangsquelle am Fernseher bitte auf „HDMI“ ein. Prüfen Sie, ob das HDMI-Kabel korrekt am Fernseher und an der Videolupe angeschlossen wurde.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)