

Orbisana Tischlupe mit LED

Art.-Nr. 148142564


BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



1. Produktidentifikation

- Ringlampen-Design mit 130 mm Durchmesser und 36 LEDs. Dadurch längere Lebensdauer der Lampe, höhere Helligkeit, weiches Licht, gleichmäßigere Ausleuchtung und klarere Sicht.
- Mit dem intelligenten Drehschalter können Sie die Lichtelligkeit nach Belieben einstellen.
- Die Linse ist aus PMMA-Material (Acryl), das leichter und einfach zu bedienen ist, die Oberfläche ist gehärtet.
- Mit der Staubschutzabdeckung können Sie die Linse abdecken, wenn die Lupe nicht benutzt wird, um Staubablagerungen zu vermeiden und die Stabilität zu erhalten.
- USB-Stromversorgung für bequemere Bedienung.

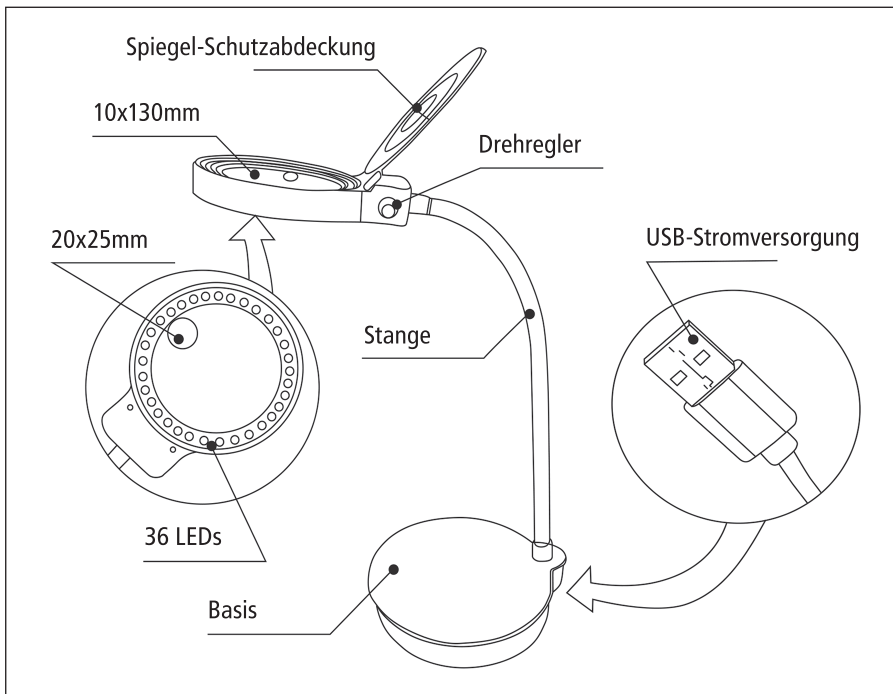

1.1. Produktbeschreibung

Diese praktische Tischlupe ist geeignet für Druck, Leiterplatten, Reparaturen an Kleingeräten, Schnitzereien, Schule, Studium, Gartenarbeit, Identifizierung von Schmuck, Münzen und Krampen, elektronische Bauteile, Lötarbeiten, Wartung, Gewindeschneiden usw. Die Lupe kann auch einfach nur als Tischlampe verwendet werden.

Technische Daten

- Durchmesser Hauptlinse: 130 mm
- Vergrößerung Hauptlinse: 10-fach
- Brennweite Hauptlinse: 250 mm
- Durchmesser Zweitlinse: 25 mm
- Vergrößerung Zweitlinse: 20-fach
- Brennweite Zweitlinse: 83 mm

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Die Tischlupe ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie die Tischlupe nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs- und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

3. Sicherheitshinweise

3.1. Sicherheitsinformation

Warnung:

- Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdungssituation, die, wenn Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Vorsicht:

- Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdungssituation, die, wenn Sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung führen kann.

Hinweis:

- Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

3.2. Sicherheitshinweise Allgemein

Warnung

- Setzen Sie die Tischlupe nicht dem direkten Sonnenlicht aus, um Entzündung und Feuer zu vermeiden.
- Benutzen Sie die Lupe nicht, um die Sonne zu beobachten, dies kann zu schweren Verbrennungen und anderen Verletzungen an Ihren Augen führen.

Vorsicht

- Blicken Sie nicht direkt in die Leuchtquelle.
- Halten Sie die Lupenleuchte fern von brennbaren Materialien.
- Bleiben Sie nicht in der Nähe des Lichts, wenn sich Ihre Haut warm anfühlt.

4. Lieferumfang

- 1x Tischlupe
- 1x USB Stromkabel
- 1x Anleitung

5. Montage // Inbetriebnahme

- Stellen Sie die Lupe auf den Tisch und stellen Sie dann die Teleskopstange auf eine für Sie angenehme Höheneinstellung (in Form einer „7“) ein.
- Öffnen Sie die Staubschutzhülle, ziehen Sie die Schutzfolie ab und betrachten Sie das Objekt durch die Linse.
- Nehmen Sie das zu betrachtende Objekt in die Hand und halten Sie es direkt unter das Vergrößerungsglas. Mit den Augen in normalem Lesezustand bewegt man die Hand langsam auf und ab, bis das Objekt deutlich zu sehen ist.
- Zur besseren Beleuchtung stecken Sie den USB-Stecker in den Ladeanschluss und verbinden das USB-Kabel mit einem USB-Netzadapter oder einem USB-Anschluss Ihres Computers. Drehen Sie langsam am Drehregler, um die Lichtintensität einzustellen.

6. Pflege, Reinigung

- Reinigen Sie die Linse regelmäßig, um Intensität des Lichts zu erhöhen.
- Wenn sich Staub auf der Linse befindet, verwenden Sie bitte ein weiches Tuch oder ein feuchtes Tuch mit einem Tropfen Wasser, um die Linse abzuwischen.
- Verwenden Sie zum Abwischen des Objektivs und des Gehäuses keinen Alkohol, Benzin oder andere chemische Flüssigkeiten.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelplatz für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)